

A close-up photograph of a woman with a bright smile, showing her white teeth. She is holding a hand mirror in front of her face. In the foreground, a dental model of a set of teeth is visible, held by a hand. The background is softly blurred, showing green foliage.

ホワイトニング

# Menu

## ホワイトニング

---

2回照射…… ¥2,750

3回照射…… ¥3,850

## 備品(初回のみ)

---

開口器…… ¥330

歯ブラシ…… ¥220

## セルフホワイトニングの特徴

### ★低料金

通常のホワイトニングと比べ、1回あたりの低価格の料金帯でホワイトニングが可能。

### ★短時間・短期間

1回あたりの時間は約30分。

始めは1週間に1回、その後は1か月に1回。

### ★安心安全

使われる溶液は無機化合物で作られており、LEDライトも安全な波長域を使用している。

### ★自然な白さ

1回単位での利用が可能で、ご自身のおペースに合わせて好きな時間に、また好みの白さにできる。



## ■7つの効果■



## ■一例■



大体1回の施術で1～2トーン明るくなります。  
数回繰り返すことによって自然な白さになります。  
※効果には個人差があります。


# ■施術の流れ■

## ① 歯のブラッシング



美歯口ホワイトはみがきをパレットから取り、1回目のブラッシングします

## ② オープナー装着

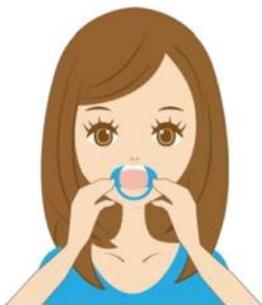

マウスオープナーをくぼみに合わせて片方ずつ口に装着します

## ③ 水分ふき取り



歯の表面の水分やよごれをティッシュでしっかりとふき取ります

## ④ 溶液塗布



ホワイト溶液を真ん中・右・左と計3プッシュ塗布します

## ⑤ LEDライト照射



アイガードを装着し、LEDライトを8分間照射しますなるべく近くでライトを当てます

## ⑥ 2セット目(①~⑤)



※この時(2回目)のブラッシングはブラシに何もつけません。

## ⑦ 歯のブラッシング



美歯口マウストリートメントをパレットから取り、3回目のブラッシングします

## ⑧ 水ですすぐ



トリートメント後はお水で口内を軽くすすぎますすすいだ水は吐き捨ててください

## ⑨ 終了



光触媒によるクリーニング作用と美歯口マウストリートメントの効果でトーンは明るく、ツルツルとした歯に

## ■ご利用規約■

・病院または鹿委員で治療を受けている方や、下記の方はご使用をお控えください。

- (1)顎関節症の方
- (2)チタンアレルギーの方
- (3)光過敏症の方
- (4)妊娠中もしくは妊娠と思われる方

・使用中に痛みや異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。中止頂けない場合はご返金には応じかねますので、ご了承ください。

・使用中は口内の唾液が溜まりやすいので、終了時起き上がる際には十分ご注意ください。

・差し歯、入れ歯、詰め物、被せ物における材質の経年劣化による変色には効果がありません。

・神経を抜いたことにより歯が変色している場合、遺伝により歯にもともと色素沈着がある場合、歯の形成期(0～8歳)にテトラサイクリン系抗生物質を利用し、副作用による永久歯に色素沈着がある場合は、白さが実感しにくくなります。

・歯の構造により汚れの落ち方に差異が生じ、白点や白線状のものが歯に浮かび上がるように見えることが稀に発生いたします。